



De OneTouch® Delica® Plus prikpen biedt een veilige, gemakkelijke manier voor het verkrijgen van een druppel capillair bloed uit de vingertop.

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u dit hulpmiddel gebruikt.

Met uw OneTouch® Delica® Plus prikpensysteem worden geen materialen meegeleverd voor testen op een andere plaats dan de vingertop. Deze prikpen mag dan ook niet worden gebruikt op de onderarm of handpalm.


De prikpen heeft 13 diepte-instellingen. De gekozen instelling moet zo diep zijn dat u een ronde druppel bloed kunt verkrijgen die voor de meter groot genoeg is om een bloedglucoseresultaat te kunnen geven. (Zie de gebruikershandleiding die met uw systeem is meegeleverd voor informatie over de juiste grootte van de bloeddruppel.)

**OPMERKING:** Gebruik de OneTouch® Delica® Plus prikpen in combinatie met OneTouch® Delica® of OneTouch® Delica® Plus lancetten. Gebruik voor elke test een nieuw, steriel lancet. Als een lancet opnieuw wordt gebruikt, kan de punt van de lancet afstompen of buigen waardoor uw huid beschadigd raakt, littekens ontstaan en u meer pijn voelt.

#### ⚠ LET OP:

Houd de prikpen buiten het bereik van jonge kinderen. De prikpen, het prikpendopje, de lancetten en de beschermdeopjes van de lancetten kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

- 1 Ontspanknop
- 2 Schuifknop
- 3 Diepte-indicator
- 4 Dieptewieltje
- 5 Prikpendop
- 6 Beschermdeopje

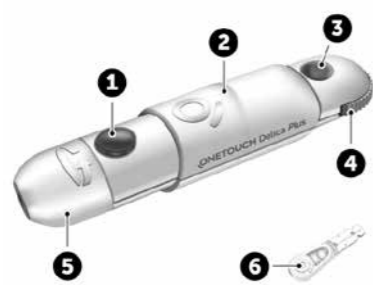

#### ⚠ LET OP:

Verklein de kans op infectie:

- Was de prikplaats met water en zeep voordat u een bloeddruppel afneemt.
- Deel nooit een lancet of prikpen met iemand anders. Uitsluitend voor gebruik bij één en dezelfde patiënt.
- Gebruik altijd een nieuw, steriel lancet: de lancetten zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. **Niet** opnieuw gebruiken.
- Houd de prikpen altijd schoon.
- Gebruik lancetten **niet** na de vervaldatum die op de desbetreffende verpakking staat vermeld.

#### De prikpen gereedmaken

##### 1. Verwijder de dop van de prikpen

Verwijder de dop door deze te draaien en vervolgens recht van de pen af te trekken.



##### 2. Plaats een steriel lancet in de prikpen

Houd het lancet zoals hier afgebeeld, zodat het lancet in de lancethouder past. Druk het lancet in de prikpen tot het op zijn plaats klikt en helemaal in de houder is geplaatst.



Draai het beschermerschijfje één keer helemaal rond totdat het loskomt van het lancet. **Bewaar het beschermerschijfje; u hebt dit nodig om het lancet te verwijderen en weg te gooien.** Zie *Het gebruikte lancet verwijderen*.



##### 3. Plaats de dop terug op de prikpen

Plaats de dop weer op de prikpen door de dop te draaien of recht op de pen te drukken en zorg dat de dop goed vast zit.



Zorg dat de dop is uitgelijnd met de pen zoals is afgebeeld.



##### 4. Stel de diepte in

De prikpen heeft 13 standen voor de prikdiepte (elke stip tussen de cijfers 1 tot en met 7 op het dieptewieltje geeft een extra beschikbare diepte-instelling aan). Stel de diepte in door het dieptewieltje te draaien. Lagere nummers zijn voor ondiepe prikpen en hogere nummers voor diepere prikpen.



**OPMERKING:** Probeer eerst een ondiepe instelling en prik dieper totdat u een instelling hebt gevonden waarbij u een druppel bloed van de juiste grootte kunt afnemen (zie de instructies bij uw meter).

##### 5. Span de prikpen

Duw de schuifknop naar achteren totdat u een klik hoort. Als u geen klik hoort, was de prikpen misschien al gespannen toen het lancet werd geplaatst.



**OPMERKING:** Als de bloeddruppel uitsmeert of uitloopt, is dat staal **niet** bruikbaar. Droog de plek af en knijp voorzichtig tot er nog een druppel bloed wordt gevormd of prik op een andere plaats.



#### Breng de bloeddruppel aan

Breng de bloeddruppel aan volgens de instructies in de handleiding bij uw meter of prikpensysteem, zodat het aanbrengen op de juiste manier gebeurt.

#### Het gebruikte lancet verwijderen

**OPMERKING:** Deze prikpen heeft een uitwerpfunctie, zodat u het gebruikte lancet er niet uit hoeft te trekken.

##### 1. Verwijder de dop van de prikpen

Verwijder de dop door deze te draaien en vervolgens recht van de pen af te trekken.



##### 2. Dek de punt van het lancet af

Voordat u het lancet verwijdert: leg het beschermdeopje van het lancet op een hard oppervlak en duw de punt van het lancet in de platte kant van het schijfje.



##### 3. Werp het lancet uit

Houd de prikpen omlaag gericht en duw de schuifknop naar voren tot het lancet uit de prikpen springt. Als het lancet niet goed wordt uitgeworpen, spant u de prikpen. Duw vervolgens de schuifknop naar voren tot het lancet naar buiten komt.



##### 4. Plaats de dop terug op de prikpen

Plaats de dop weer op de prikpen door de dop te draaien of recht op de prikpen te drukken en zorg dat de dop goed vast zit.



Zorg dat de dop is uitgelijnd met de pen zoals is afgebeeld.



Wees na ieder gebruik voorzichtig bij het weggoien van het gebruikte lancet om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan het lancet prikt. Gebruikte lancetten worden in bepaalde gebieden beschouwd als biologisch gevaarlijk afval. Volg voor de juiste manier van weggoien het advies van uw arts/diabetesverpleegkundige of ga te werk volgens de plaatselijke regelgeving.

#### Uw prikpen bewaren

Er zijn geen speciale voorwaarden voor het bewaren. Bewaar de prikpen in het etui dat bij uw systeem is geleverd.

#### Prikpen en dop reinigen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding die met uw meter is meegeleverd voor informatie over reiniging en desinfectie. Als de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding hierover geen instructies bevat voor deze prikpen en dop, volg dan de onderstaande instructies.

Reinig deze onderdelen door ze schoon te vegen met een zachte doek die is bevochtigd met water en een mild schoonmaakmiddel. Dompel de prikpen **niet** onder in vloeistof.

Desinfecteer deze onderdelen met een oplossing van één deel bleekmiddel op negen delen water. Veeg de prikpen af met een zachte doek die met deze oplossing is bevochtigd. Dompel **alleen de dop** in deze oplossing onder, gedurende 30 minuten. Spoel de prikpen en de dop na het desinfecteren kort af met water en laat ze aan de lucht drogen.\*

\*Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruiken en bewaren van bleekmiddel.

#### ONZE BELOFTE AAN U:

**Ons streven is om u producten van hoge kwaliteit en uitstekende klantenservice te bieden. Als u niet 100% tevreden bent met dit product of als u vragen hebt over het gebruik van een OneTouch® product, neem dan contact op met de OneTouch® lijn. Contacteer onze gratis OneTouch® lijn via 0800-15325 (België) of bezoek onze website [www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be). Lijnen open van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 17.00u. Neem voor advies contact op met uw arts/diabetesverpleegkundige als u de OneTouch® lijn niet kunt bereiken.**

#### Description des symboles

Pour obtenir une description complète de tous les symboles utilisés, veuillez vous référer au guide d'utilisation fourni avec votre système.



Avertissements et mises en garde : Référez-vous au manuel d'utilisation et aux notices accompagnant votre système pour des informations relatives à la sécurité.



Consulter le mode d'emploi



Fabricant



Représentant autorisé dans l'Union européenne



Ne pas réutiliser



Stérilisé par irradiation



Ne pas jeter avec les déchets ordinaires



Date de péremption

#### Beschreibung der Symbole

Eine komplette Beschreibung aller verwendeten Symbole finden Sie in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.



Vorsichts- und Warnhinweise: Lesen Sie Informationen zur Sicherheit in der Gebrauchsanweisung und den Beipackzetteln, die Ihrem System beiliegen.



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft



Nicht wiederverwenden



Sterilisation durch Bestrahlung



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen



Verfallsdatum

#### Beschrijving van symbolen

Zie de bij uw systeem geleverde gebruikershandleiding voor een volledige beschrijving van alle gebruikte symbolen.



Aandachtspunten en waarschuwingen: Raadpleeg de gebruikershandleiding en de bijsluiters die met uw systeem zijn meegeleverd voor informatie over veiligheid.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap



Niet hergebruiken



Gesteriliseerd door middel van straling



Niet voor normaal huisvuil



Uiterste gebruiksdatum

#### Bloeddruppel uit de vingertop afnemen

Kies voor elke test een andere prikplaats. Herhaald prikpen op dezelfde plaats kan pijnlijk zijn en eelt veroorzaken.

**Was uw handen en de prikplaats met warm water en zeep voordat u een test uitvoert. Spoel en droog goed af. Vuil op de huid kan invloed hebben op de resultaten.**

##### 1. Prik in uw vinger

Houd de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vinger. Druk op de ontspanknop. Neem de prikpen van uw vinger.



##### 2. Vorm een ronde bloeddruppel

Knijp voorzichtig in uw vingertop en/of masseer deze een beetje totdat zich een ronde druppel bloed heeft gevormd.



Asahi Polyslider Co., Ltd.  
860-2 Misaki, Maniwa  
Okayama 719-3226, Japan



LifeScan Europe GmbH  
6300 Zug  
Switzerland

OneTouch®

AW 07195501A

Date rév. :/Rev.-Datum:/Revisedatum: 08/2018

© 2018 LifeScan, Inc.



0120